

最初に必ずお読みください

大正製薬 健康チェッカー 『骨質』

検査の手順

- キット内容物
- ・健康チェッカー『骨質』について
 - ・検査の手順(本書)
 - ・検査依頼書
 - ・採尿キット
 - ・返送用封筒

結果がお手元に届くまで、
この用紙は大切に保管してください。

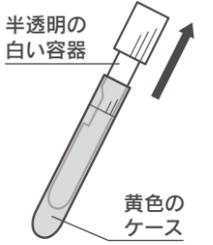
PG04_a

手順1 採尿の前に

・暴飲暴食、睡眠不足など極端な状態を避け、できるだけ従来通りの生活を送った状態での検査をお勧めします。

<p>オススメ</p>  <p>朝一番の尿</p> <p>※一番濃い状態で採尿</p>	<p>オススメ</p>  <p>中間尿</p> <p>※尿の始めと終わりは採らない</p>
<p>NG</p>  <p>生理中</p> <p>※血液が混じらないように</p>	<p>NG</p>  <p>年末・大型連休</p> <p>※検査施設で受け取れません</p>

手順2 採尿

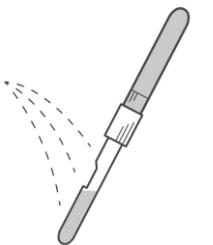
- 

半透明の白い容器

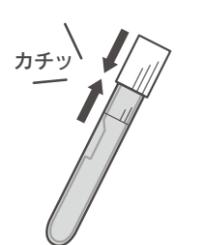
黄色のケース

・採尿容器は2つのパーツに分かれます。
・黄色のケースから半透明の白い容器をまっすぐ引き出します。

※折らない

困ったら!
採尿方法を動画で確認できます。
- 

・2つのパーツを図のように連結します。
・半透明の白い容器に尿を直接ためます。
・量は1cm以上入れれば検査可能です。

※紙コップ等、別の容器に尿を採ってから、採尿容器に移していただいても検査に影響ありません。
- 

カチツ

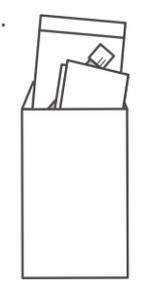
・黄色のケースをはずして半透明の白い容器にかぶせ、カチツと音がするまで強く押し込みます。

※しっかり閉める

すきまは開けない

手順3 必要事項の記入&提出

- 

キットに同梱されている「検査依頼書」に黒のボールペンで必要事項を記入してください。
※記入漏れのないようご注意ください。
※個人情報の取扱いについては、本紙の裏面の「お客様の個人情報を守るための明示・同意書」をご確認ください。
- 

検体を入れたビニール袋のチャックをしっかりと閉め、1.の「検査依頼書」と一緒に返送用封筒に入れます。
※投函前に、必ず採尿容器のシールに記載された「検査ID(9桁)」を下記に控え、結果が届くまで本書をお手元に保管してください。

PG
- 

ポストへ投函します。
※検査結果までの目安：約2週間

手軽に骨質の状態を調べられる検査です

採尿を行う前に、必ずキットの中の「検査の手順」をよく読み、正しくご利用ください。

— ご自宅からカンタン郵送検査 —

<p>1</p>  <p>自宅で採尿</p>	<p>2</p>  <p>ポストに投函</p>	<p>3</p>  <p>結果をお届け</p>
--	---	---

— 検査結果について —

- ①ペントシジンの測定値
 - ②平均値との比較*
 - ③レベル判定(A~Dランク)
 - ④生活習慣のアドバイス
- ※ヘルスケアシステムズ社調査

ご注意

・健康チェッカー『骨質』は生活習慣を見直すためのヘルスケアチェックです。病気の診断をするものではありませんのでご注意ください。

【ご注文窓口】	【製品・検査のお問い合わせ窓口】
大正製薬ダイレクト TEL:0120-81-8428	株式会社ヘルスケアシステムズ お客様相談窓口 TEL:050-3640-3595 午前9:00~午後5:00(土、日、祝日を除く)

採尿容器:PET ケース:PET 説明書類

【販売者】
株式会社ヘルスケアシステムズ
愛知県名古屋市千種区千種2-22-8

【取扱い】
大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3-24-1

研究への同意について

大正製薬株式会社では、今後の研究、及びサービス向上のため、お客様の検査結果を活用させていただきたいと考えております。
(個人情報と切り離し、匿名化した上で活用いたします)

本紙裏面の「検査データとヘルスケアに関する研究へのご協力について」をご覧ください、研究へのご協力にご同意いただける場合は、検査依頼書へ必要事項をボールペンで記入の上、検体をお送りください。

(ご同意いただかなくても、検査は通常通りお受けいただけます)



・同意日(ご記入頂いた日付)
・お名前

ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

ご投函前に

検体を返送用封筒でご投函いただく前に、必ず下記の項目をご確認の上、ポストへご投函ください。

- 採尿容器にある「検査ID」はお控えいただけましたか？(お問い合わせ時に必要になります)
- 採尿容器のケースは、しっかり閉まっていますか？
- 検体を入れたビニール袋のチャックはしっかり閉まっていますか？
- 返送用封筒に、検査依頼書は入れましたか？
- 年末や大型連休前ではありませんか？

こんなときは

- ・検査についてくわしく知りたい
- ・採尿容器がこわれてしまった
- ・検査依頼書を入れ忘れて検体だけ送ってしまった
- ・結果がなかなか届かない…

その他、ご不明な点は下記までお問い合わせください。

＜製品・検査に関するお問い合わせ窓口＞

株式会社ヘルスケアシステムズ
TEL:050-3640-3595
午前9:00~午後5:00(土、日、祝日を除く)
MAIL:info@hc-sys.jp

＜ご注文窓口＞

大正製薬ダイレクト
TEL:0120-81-8428

