



さまざまな傷の保護に
救急バン **キズガード** スタンダード 100枚入
救急絆創膏

スタンダード
100枚入

一般医療機器 スタンダード(普通サイズ)
72mm×19mm

(キズを早くきれいに治すお手当方法)

<p>①洗浄</p> <p>水道水で洗います。</p>	<p>②消毒</p> <p>殺菌消毒します。</p>	<p>③止血</p> <p>ガーゼなどでおさえます。</p>
<p>④保護</p> <p>キズガードのパッド部分を傷に当て、テープをしっかり押さえて密着させてください。最初つきにくく感じるかもしれませんが、すぐに皮膚になじんでピッタリフィットします。 ※よく伸びるテープですので、貼る時に皮膚を強く引っ張らないようご注意ください。</p>		

販売元
大正製薬株式会社 大正製薬(株)お客様119番線
東京都葛飾区高田3丁目24番1号 ☎ 03-3985-1800
<http://www.taisho.co.jp> ☎ 受付時間 9:30~21:00
製造販売元、製造元 (土、日、祝日を除く)
東洋化学株式会社
兵庫県相生町日野町寺尾1008番地
医療機器届出番号 25B2X10004000002

傷につかない救急バン
キズガード
販売名:キズガード




よく伸び、むれにくい救急バン
キズガード スタンダード 100枚入

開封口

さまざまな傷の保護に
救急バン **キズガード**

- よく伸び、むれにくい
- 傷につかない
- 湯水に強い

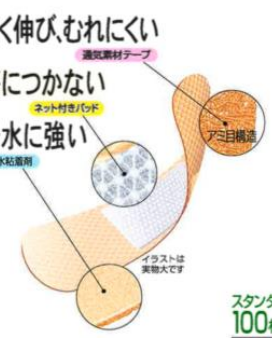

スタンダード
100枚入
滅菌済

使用上の注意
★本剤の使用により、痒疹・発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合には使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。★貼付箇所を患部に貼らないでください。★パッド部分が濡れ、因に乾かすことで、長時間貼付した際の発疹にはご注意ください。★患部の治りが悪くなるので、患部を清潔にし、貼り替えてください。★夜が更けたら、取り除き、新しいものを貼ってください。★小児の手の届かない所に保管してください。★直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管してください。★品質保持期間を経過したものは使用しないでください。★再使用しないでください。

湯水に強い救急バン
キズガード
スタンダード 100枚入

製造番号 品質保証期間